



Centre National de Référence des Méningocoques et d ' Haemophilus influenzae

NOTE TECHNIQUE

Envoi des souches de Neisseria meningitidis au CNR

Le Centre National de Référence (CNR) des Méningocoques et d ' Haemophilus influenzae a validé un nouveau milieu de transport pour l ' envoi des souches de Neisseria meningitidis. Il s ' agit des écouvillons avec gel Amies Charcoal.

Un lot de deux écouvillons est fourni pour le transport des souches de Neisseria meningitidis vers le CNR.

Mode d ' emploi :

- Travailler sous cabinet de sécurité microbiologique (P2).
- Sortir un écouvillon de son étui stérile.
- Prélever une culture pure de 18–24 h (boîte PVX ou équivalent).
- Remettre l ' écouvillon dans son étui et fermer hermétiquement (si besoin, scotcher le bouchon).
- Envoyer le prélèvement au CNR en triple emballage, selon le circuit habituel de transport.
- Joindre la fiche de renseignements habituelle avec l ' envoi.

Pour toute question, merci de contacter le CNR à l ' adresse habituelle.

CNR des Méningocoques et d'Haemophilus influenzae
Institut Pasteur
28 rue du Dr Roux
75724 Paris cedex 15
Tel +33140 61 31 08
courriel meningo@pasteur.fr