



**Centre National de Référence des Méningocoques et
d'*Haemophilus influenzae***

NOTE TECHNIQUE

Envoi des souches de *Neisseria meningitidis* au CNR

Le Centre National de Référence (CNR) des Méningocoques et d'*Haemophilus influenzae* a validé un nouveau milieu de transport pour l'envoi des souches de *Neisseria meningitidis*.

Il s'agit des écouvillons avec gel Amies Charcoal.

Un lot de deux écouvillons vous est adressé pour le transport des souches de *Neisseria meningitidis* vers le CNR.

Mode d'emploi

1. Travailler sous cabinet de sécurité microbiologique (P2).
2. Sortir un écouvillon de son étui stérile.
3. Prélever une culture pure de 18–24 h (boîte PVX ou équivalent).
4. Remettre l'écouvillon dans son étui et fermer hermétiquement (si besoin, scotcher le bouchon). Joindre la boîte PVX à l'envoi.
5. Envoyer le prélèvement au CNR en triple emballage, selon le circuit habituel de transport.
6. Joindre la fiche de renseignements habituelle avec l'envoi.

CNR des Méningocoques et d'*Haemophilus influenzae*
Institut Pasteur
28 rue du Dr Roux
75724 Paris cedex 15
Tél. 01 45 68 81 78
Courriel : meningo@pasteur.fr